


## Niet-klevend schuimverband Soft-Hold schuimverband

 Coloplast A/S  
 3050 Denmark  
 IFU10968 V6 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. © [2011-02.] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

### Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik kan mogelijk risico voor de gebruiker met zich meebrengen. De productkenmerken kunnen worden aangetast als dit product opnieuw wordt klaargemaakt voor gebruik, gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd; hierdoor kan de patiënt lichamelijke schade of een infectie oplopen.

### Contra-indicaties

Gebruik de Biatain Ibu-schuimverbanden niet als de gebruiker (patiënt of professionele zorgverlener) overgevoelig is voor ibuprofen of een ander bestanddeel, acetylsalicylzuur of andere NSAIDS, vooral wanneer de patiënt een voorgeschiedenis heeft van astma, rinitis of urticaria.

Voor geïnfecteerde wonden, met inbegrip van erysipelas, moet een aangepaste behandeling worden gebruikt.

Wanneer u een mogelijk allergische reactie opmerkt, neem dan contact op met Coloplast A/S voor meer informatie.



Gebruik Biatain Ibu-schuimverbanden niet tijdens de zwangerschap.



Gebruik Biatain Ibu-schuimverbanden niet bij kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij op advies van een arts.

Overschrijd de aangegeven dosis niet.

Biatain Ibu Soft-Hold-schuimverbanden mogen niet worden gebruikt op donorsites.

### Voorzorgsmaatregelen

Een professionele zorgverlener dient geïnfecteerde wonden, diabetische wonden en wonden die volledig of gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te inspecteren en te behandelen.

Gebruik Biatain Ibu-schuimverbanden niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Zorg dat eventuele andere vluchtige oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt aangebracht.

Ibuprofen kan in zeldzame gevallen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Biatain Ibu-schuimverbanden moeten worden verwijderd voor stralingsbehandelingen en onderzoeken d.m.v. röntgenstralen, ultrasone trillingen, diathermie, microgolven of MR-scans.

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Buiten bereik van kinderen houden.

Biatain Ibu Soft-Hold-schuimverbanden moeten in een horizontale positie worden bewaard.

Direct zonlicht vermijden.

Alleen voor uitwendig gebruik.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt bij gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

### Aanbrengen



1. Biatain Ibu niet-klevende schuimverbanden  
Het verband wordt op de wond aangebracht met de niet-bedrukte zijde.



2. Biatain Ibu Soft-Hold-schuimverbanden  
Verwijder de beschermende film en breng het verband op de wond aan met de niet-bedrukte zijde.

### Verwijderen



Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig weg van de wond.

### Beschrijving

Biatain Ibu-schuimverbanden zijn steriele, zachte, sterk absorberende en comfortabele polyurethaan schuimverbanden voor eenmalig gebruik. Ze bevatten ibuprofen (0,5 mg/cm<sup>2</sup>) dat homogeen in het schuim is verspreid. De verbanden bieden een vochtig milieu voor optimale wondgenezing en effectieve exsudaatbehandeling. Ibuprofen komt in het wondbed vrij wanneer het in contact komt met wondexsudaat.

Biatain Ibu-schuimverbanden zijn beschermd met een semipermeabele folielaag die waterdicht is en een barrière vormt voor bacteriën.

Biatain Ibu niet-klevende schuimverbanden hebben geen kleeflaag en zijn dus geschikt voor gebruik op broze huid.

Biatain Ibu Soft-Hold-schuimverbanden hebben een zachte, gebruiksvriendelijke en gedeeltelijk klevende laag die het verband op zijn plaats houdt terwijl een secundair verband of compressietherapie wordt aangebracht of verwijderd.

### Indicaties

Biatain Ibu-schuimverbanden worden toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden, zoals ulcus cruris, decubitus en niet-geïnfecteerde diabetische voetulcera.

Biatain Ibu-schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor tweedegraadsbrandwonden, postoperatieve wonden en schaafwonden.

Biatain Ibu niet-klevende schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor donorsites.

Biatain Ibu-schuimverbanden kunnen maximaal 6 weken worden gebruikt zolang dit klinisch is aangewezen.

Biatain Ibu-schuimverbanden bieden een vochtig milieu voor wondgenezing en kunnen de pijn verminderen die door weefselbeschade wordt veroorzaakt.

Biatain Ibu-schuimverbanden zijn geschikt voor gebruik in combinatie met compressietherapie.

### Aanwijzingen

Biatain Ibu-schuimverbanden

Spoel de wond met lauw water of een fysiologische zoutoplossing. Droog de huid rond de wond voorzichtig. Van andere reinigingsmiddelen is niet aangetoond dat zij in combinatie met Biatain Ibu-schuimverbanden veilig gebruikt kunnen worden.

Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen.

Haal de Biatain Ibu-schuimverbanden op aseptische wijze uit de verpakking. Raak de niet-bedrukte zijde van het schuim niet aan.

Breng Biatain Ibu-schuimverbanden overeenkomstig de illustraties en aanwijzingen aan. Selecteer een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 2 centimeter overlapt. Voor kleinere verbanden is slechts een overlapping van 1 centimeter nodig.

Indien de wond weinig exsudeert, kunnen Biatain Ibu-schuimverbanden worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplossing vooraleer ze op de wond worden aangebracht.

Biatain Ibu niet-klevende schuimverbanden en Biatain Ibu Soft-Hold klevende schuimverbanden moeten worden vastgezet met een secundair verband of compressieverband.

Biatain Ibu-schuimverbanden moeten worden verversd wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband.

Biatain Ibu-schuimverbanden kunnen tot 7 dagen lang aangebracht blijven afhankelijk van de exsudaathoeveelheid, de staat van het verband en het type wond.

Biatain Ibu-schuimverbanden kunnen worden gebruikt tot maximaal 1200 cm<sup>2</sup> bij elke verbandwissel (bv. 3 verbanden van elk 20x20 cm). Het verband mag niet meer dan twee keer per dag worden gewisseld, wat overeenkomt met een maximaal dagelijks gebruik van 2400 cm<sup>2</sup>.

#### **Symbol**

<b>WO</b>	Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een specifieke order (het LOT-nummer geeft de productiepartij aan).
-----------	--