

Mepilex® Border Post-Op

Het absorberend, zelfklevend, flexibel en chirurgisch wondverband

- Minimaliseert risico op blaarvorming¹
- Optimaal wondvochtmanagement voor post-operatieve wonden²
- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels³
- Zeer flexibel wondkussen dat bewegingsvrijheid biedt aan de patiënt⁴

Rugfilm van polyurethaan

- Sterk ademend
- Bacterie-, virus- en douchebestendig (microben > 25nm)
- Brede, transparante fixatieranden

Safetac®-laag

- Minimaliseert risico op blaarvorming¹
- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels³
- Kleeft niet aan het vochtige wondbed, alleen aan de droge huid⁵
- Sluit de wondranden goed af en vermindert het risico op maceratie^{6,7,8}
- Minimaliseert het risico op verkleving aan hechtingen en nietjes¹
- Minimaliseert het risico op huidstripping^{9,10}

Safetac
TECHNOLOGY

Meerlaags absorberend kussen met Flex technologie

De Flex Technologie is een geperforeerd patroon in het absorberend kussen dat zorgt voor meer bewegingsvrijheid.


- Superabsorberende vezels voor hoge en snelle absorptie met optimale retentie²
- Zeer hoge flexibiliteit bij de gewrichten (heup, knie, enz.)⁴




Safetac® technologie

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder Mepilex Border Post-Op, Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.

Surf voor meer informatie naar www.safetac.com

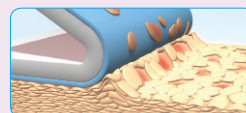

Traditionele kleeflagen hechten zich alleen aan de tophuidcellen. Daardoor kleeft het verband plaatselijk harder om ter plaatse te kunnen blijven.

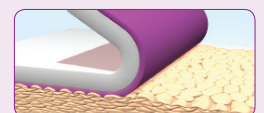

Safetac vormt zich naar de huidporiën en sluit daarbij de wondranden goed af. Het kleeft bovendien niet in een vochtig wondbed.

Gebruiksaanwijzing



Open de steriele verpakking en haal het verband eruit.



Open het kleinere gedeelte van het schutblad en fixeer de Mepilex Border Post-Op op de huid.
Haal eerst het smalle schutblad weg en dan het brede schutblad



Hoge flexibiliteit biedt meer bewegingsvrijheid voor de patiënt

Hoe Mepilex Border Post-Op werkt

Mepilex Border Post-Op is een absorberend, zelfklevend, flexibel en chirurgisch wondverband dat zeer efficiënt absorbeert en chirurgisch exsudaat vasthoudt. De Safetac-laag minimaliseert risico op blaarvorming¹ en verzekert dat het verband verwisseld kan worden zonder de wond of omliggende huid te beschadigen of de patiënt bloot te stellen aan bijkomende pijn². De Safetac-laag sluit de wondranden af, zodat het exsudaat niet verder kan doorsijpelen naar de omliggende huid. Dit minimaliseert het risico op maceratie^{6,7,8}. De Flex technologie zorgt voor een hoge flexibiliteit bij gewrichten zoals de heup en knieën waardoor de patiënt meer bewegingsvrijheid heeft⁴.

Voordelen van Mepilex Border Post-Op

- Minimaliseert risico op blaarvorming¹
- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissel³
- Exsudaatmanagement geoptimaliseerd voor post-operatieve wonden²
- Hoge flexibiliteit die bewegingsvrijheid biedt aan de patiënt⁴
- Minimaliseert het risico op verkleving aan hechtingen en nietjes¹
- Sluit wondranden af en vermindert het risico op maceratie^{6,7,8}
- Kan opgelicht en teruggeplaatst worden zonder dat de adhesiekracht verloren gaat
- Brede transparante randen voor eenvoudige wondinspectie
- Bacterie- en virusbestendig (microben > 25nm)
- Laat geen resten achter en kleine kans op huidirritaties en -allergiën
- Douchebestendig

Frequentie van verbandwissel

Mepilex Border Post-Op kan meerdere dagen op de wond blijven, afhankelijk van de conditie van de wond en de omliggende huid, of volgens lokale richtlijnen.

Indicaties

- Exsuderende wonden
- Acute wonden, zoals chirurgische wonden.

Voorzorgsmaatregelen

- In geval van tekenen van klinische infectie, raadpleeg een zorgverlener voor een zorgvuldige infectieverzorging.
- Niet gebruiken bij patiënten waarvan bekend is dat zij gevoelig zijn voor het verband of één van de bestanddelen.

Mepilex Border Post-Op assortiment

Art. nr	Afm. verband (cm)	Afm. wondkussen (cm)	Absorptie	Stuks/RET	Stuks/TRP
495100	6x8	3x5	Gem-hoog	10	80
495200	9x10	4,5x6	Gem-hoog	10	70
495300	9x15	4,5x10	Gem-hoog	10	100
495400	10x20	4,5x14,5	Hoog	10	120
495450	10x25	4,5x19,5	Hoog	10	60
495600	10x30	4,5x24	Hoog	10	40
495650	10x35	4,5x29	Hoog	10	50

Elke maat is geoptimaliseerd wat betreft absorptie, flexibiliteit en kleefkracht. De maten vanaf 20 cm hebben een absorberend kussen voor sterk exsuderende wonden en de kleinere maten hebben een absorberend kussen voor gematigd tot sterk absorberende wonden.



Referenties:

1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium 2012. 2. Fluid handling capacity. Mölnlycke Health Care Lab. report 20121101-002. Downloadable from www.molnlycke.com 3. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 4. Tensile force. Mölnlycke Health Care Lab. report 20121019-004. Downloadable from www.molnlycke.com 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 6. Meaume S. et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with aself adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 7. Felii F et al. Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008. 8. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 9. Waring P. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressin adhesives. Journal of Wound Care, 2011. 10. Dykes P.J. et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2004.

Meer informatie op: www.molnlycke.be of www.molnlycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, België. Tel +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care, Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care. © 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.


Mölnlycke®