

# Mepilex®

# Mepilex® Heel

## ABSORBEREND SCHUIMVERBAND

- Minimaliseert pijn en weefseltrauma
- Hoge absorptiecapaciteit (5 mm dik) voor vochtige tot natte wonden
- Kan worden opgelicht en teruggeplaatst
- Kan op maat worden geknipt voor verschillende wondvormen en moeilijk te bedekken gebieden
- Zeer geschikt voor gebruik onder drukverbanden

### Safetac® laag

- Atraumatisch bij verbandwissels
- Kleeft niet in de wonde
- Minder risico op maceratie

### Polyurethaan schuimkussen (5 mm)

- Absorbeert veel exsudaat
- Werkt ook onder drukverbanden
- Weinig kans op huidirritatie
- Aangenaam draagcomfort

### Polyurethaan film op de rugzijde


- Lucht- en waterdampdoorlaatbaar
- Waterdicht
- Virus- en bacteriebestendig (>25nm)

**Safetac®**  
TECHNOLOGY


### Safetac® technologie

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma aan de wond minimaliseert. Safetac is uitsluitend beschikbaar bij wondverbanden van Mölnlycke Health care, waaronder Mepilex wondverbanden, Mepitel, Mepiform en Mepitac.

Surf voor meer informatie naar [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

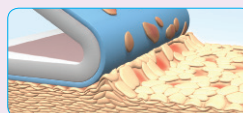


Traditionele kleeflagen hechten zich alleen aan de tophuidcellen. Daardoor kleeft het verband plaatselijk harder om ter plaatse te kunnen blijven.

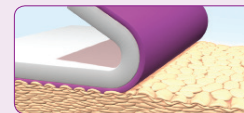

Safetac vormt zich naar de huidporiën en sluit daarbij de wondranden goed af. Het kleeft bovendien niet in een vochtig wondbed.


## Gebruiksaanwijzing

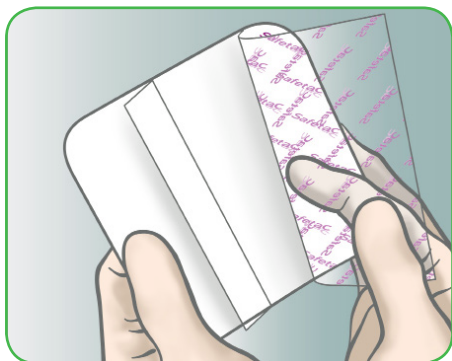

Reinig het wondgebied.  
Verwijder het schutblad.



Zorg ervoor dat Mepilex® wordt aangebracht met een overlap van minimum 2 cm op de omliggende huid. Breng de klevende zijde op de wond aan. Het verband niet uittrekken.

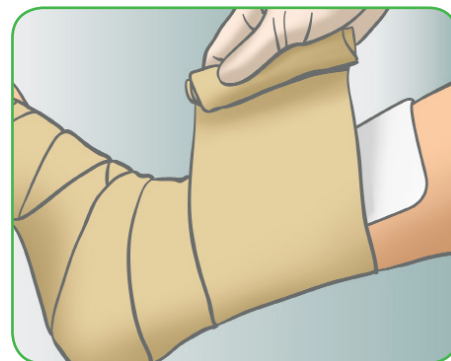

Fixeer Mepilex® indien nodig met een zwachtel of een ander fixatieverband.

## Voordelen

- Minimaliseert pijn en trauma bij verbandwissels
- Minimaliseert risico op maceratie
- Uitstekend exsudaatmanagement
- Blijft zonder hulp ter plaatse (autofixatie), wat het aanbrengen van druk- of fixeerverbanden vereenvoudigt
- Zeer geschikt voor gebruik onder drukverbanden
- Kan op maat worden geknipt worden
- Aangenaam draagcomfort
- Kan meerdere dagen ter plaatse blijven, afhankelijk van de wondconditie
- Kan worden opgelicht en teruggeplaatst
- Weinig kans op huidirritatie of allergische reactie

## Indicaties

- Vochtige wonden, zoals been- en voetulcera
- Diabetes voet
- Acute letsels zoals schaafwonden, skin tears (categorie 3), oppervlakkige 2degraadsbrandwonden
- Oncologische en bestralingswonden

## Voorzorgsmaatregelen

Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.



### Mepilex assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
294015	5x5	15811336	5	40
294150	10x12	15739848	5	50
294250	12x20	15739856	5	50
294350	15x17	15739864	5	25
294450	20x22	15739872	5	20
294500	20x50	15739880	2	12

### Mepilex Heel assortiment

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr.	Stuks/RET	Stuks/TRP
288100	13x20	15135586	5	25
288300	15x22	15555402	5	25

Meer informatie op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD Breda, Nederland. Tel +31 (0)76 521 96 63 - Fax +31 (0)76 522 17 82

Mölnlycke Health Care, Mepilex® zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken en logo's van Mölnlycke Health Care.

© 2013 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.