



 **smith&nephew**
ALLEVYN[®] Ag
Wondkompres met zilver

Antimicrobiële foamkompresen



ALLEVYN[®] Ag, een range antimicrobiële foamkompresen

ALLEVYN Ag Adhesive, ALLEVYN Ag Sacrum, ALLEVYN Ag Non-Adhesive & ALLEVYN Ag Heel zijn absorberende antimicrobiële foamkompresen die uit een drielaagse structuur bestaan:

- 1 een geperforeerde wondcontactlaag
- 2 een SSD (Silver Sulfadiazine) bevattende absorberende hydrocellulaire foamskern
- 3 een topfilm welke waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën is

Voordelen

Het SSD is effectief tegen micro-organismen aanwezig in het kompres en in de wond. In contact met exsudaat zorgt het kompres voor een optimaal vochtig wondmilieu en vermindert de bacteriële contaminatie. Het kompres vormt een effectieve barrière tegen bacteriële contaminatie (OPSITE[®] film) en beschermt de wond tegen invasieve pathogene micro-organismen zoals Pseudomonas, MRSA en VRE (*in vitro*), waardoor het een snellere wondgenezing stimuleert.

- Antimicrobiële werking tegen een breed spectrum micro-organismen
- Gecontroleerde zilverafgifte tot 7 dagen lang
- Creëert een vochtig wondmilieu
- Niet verklevend aan de wond
- Eenvoudig aan te brengen
- Zacht en comfortabel

Indicaties

ALLEVYN Ag kompressen zijn ontwikkeld voor de behandeling van chronische en acute, diepe en oppervlakkige exsuderende geïnfecteerde wonden of wonden met vergrote kans op infectie zoals: decubitus, beenulcera, diabetische voetulcera, brandwonden, donor sites, schimmelende, oncologische en chirurgische wonden.

Applicatie

Reinig de wond en droog de randen volgens lokaal klinisch protocol.

Bij gebruik van de zelfklevende varianten (ALLEVYN Ag Adhesive & ALLEVYN Ag Sacrum); verwijder het beschermepapier van het kompres en plaats het kompres met de klevende zijde over de wond.


Bij gebruik van de niet klevende varianten (ALLEVYN Ag Non-Adhesive & ALLEVYN Ag Heel), plaats het kompres met de witte zijde op de wond en fixeer deze vervolgens met een fixatiepleister (bijvoorbeeld OPSITE[®] FLEXIFIX[®]), tape of zwachtel. De kompressen kunnen tot 7 dagen *in situ* blijven (ALLEVYN Ag Sacrum 5 dagen), afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat. Tijdens de start van de wondbehandeling is het verstandig de ALLEVYN Ag kompressen regelmatig te controleren. Houd altijd rekening met het lokale protocol.

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik ALLEVYN Ag kompressen niet in combinatie met oxiderende producten, zoals hypochloride oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide omdat deze producten de absorberende polyurethaan componenten van de kompressen kunnen aantasten. Vermijd contact met elektrodes of geleidende gels gedurende elektronische metingen zoals EEG en ECG.

Wanneer men met ALLEVYN Ag een MRI (Magnetic Resonance Imaging) onderzoek ondergaat is lichte verwarming te verwachten.

ALLEVYN Ag niet combineren met producten op oliebasis, zoals bijv. vaseline. In het geval van klinische infectie, vervangt lokaal zilver niet de noodzaak van systemische therapie of andere adequate infectiebehandelingsmethoden.

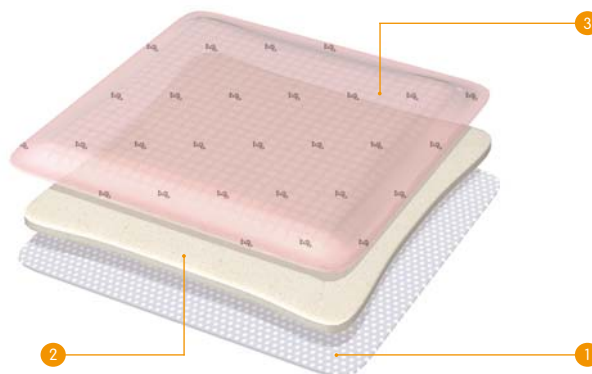

ALLEVYN Ag Adhesive

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800072	7,5 x 7,5 cm	10
66800074	10 x 10 cm	10
66800076	12,5 x 12,5 cm	10
66800080	17,5 x 17,5 cm	10



ALLEVYN Ag Sacrum

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800092 (klein)	17 x 17 cm	10
66800095	22 x 22 cm	10



ALLEVYN Ag Non-Adhesive

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800082	5 x 5 cm	10
66800084	10 x 10 cm	10
66800087	15 x 15 cm	10
66800090	20 x 20 cm	10



ALLEVYN Ag Heel

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800098	n.v.t.	5



Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020 - 654 39 99
F 020 - 653 20 99
E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl
www.allevyn.com