

Licht-klevend hydrocellulair foamkompres



ALLEVYN[◇] Gentle, licht-klevend hydrocellulair foamkompres

ALLEVYN Gentle is een absorberend foamkompres voorzien van een licht klevende soft-gel kleeflaag welke als helpende hand dient tijdens het aanbrengen. ALLEVYN Gentle bestaat uit een drielaagse structuur:

- 1 een geperforeerde wondcontactlaag met een soft-gel kleeflaag
- 2 een absorberende hydrocellulaire foamskern
- 3 een topfilm welke waterdicht en ondoordringbaar voor bacteriën is

Voordelen

De geavanceerde drielaagse structuur van ALLEVYN Gentle zorgt voor dynamisch vochtmanagement om een optimaal vochtig wondmilieu te creëren, waardoor snellere genezing plaatsvindt en er minder kans op maceratie is. De wondcontactlaag van ALLEVYN Gentle is gecoat met een soft-gel kleeflaag die ervoor zorgt dat secundaire fixatie eenvoudig is aan te brengen ("helpende hand" kompres) en dat het kompres atraumatisch en pijnloos verwijderd kan worden bij verbandwisselingen. ALLEVYN Gentle kompressen zijn zacht en soepel waardoor het kompres comfortabel is en de patiënt beschermd wordt bij verbandwisselingen. ALLEVYN Gentle is eenvoudig in gebruik en kan opgetild en opnieuw aangebracht worden zonder de licht klevende eigenschappen te verliezen. ALLEVYN Gentle is geschikt voor gebruik op een gevoelige en/of droge huid.

- "Helpende hand" kompres (klevende wondcontactlaag)
- Atraumatisch voor wond en omliggende huid
- Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
- Zacht en comfortabel, geen restanten
- Pijnloos voor de patiënt
- Vochtig wondmilieu voor optimale genezing
- Opnieuw aan te brengen

Indicaties

Wondverzorging van chronische en acute exsuderende wonden, oppervlakkige of granulerende wonden zoals decubitus, beenulcera, diabetische ulcera, schimmelende wonden, chirurgische wonden, eerste en tweedegraads brandwonden en donorplaatsen.

Applicatie



Reinig de wond en droog de randen volgens lokaal klinisch protocol.

Verwijder het beschermepapier van ALLEVYN Gentle


Breng de klevende zijde op de wond aan.

ALLEVYN Gentle kan op maat geknipt worden om op moeilijke plaatsen gebruikt te worden. Gebruik altijd een aseptische techniek bij het knippen van het kompres.

ALLEVYN Gentle kan opnieuw worden aangebracht zonder de klevende eigenschappen te verliezen.

ALLEVYN Gentle kan tot 7 dagen in situ blijven, maar dient eerder verwisseld te worden indien het exsudaat doorlekt.

Fixeer ALLEVYN Gentle met fixatiepleisters zoals bijv. OPSITE[◇] FLEXIFIX[◇], tape of zwachtel.

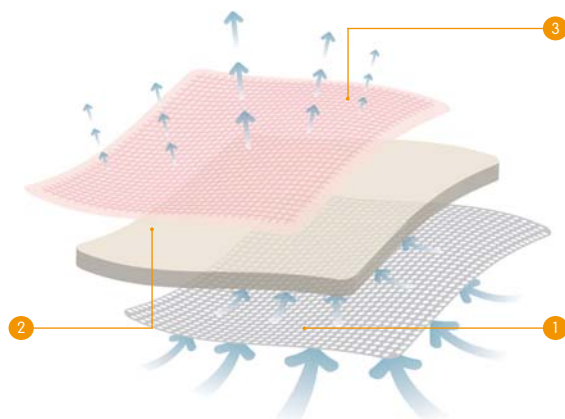

Voorzorgsmaatregelen

ALLEVYN Gentle kompressen niet gebruiken in combinatie met oxiderende producten of hypochloriet oplossingen (bijv. Eusol) of waterstofperoxide, omdat deze producten de absorberende polyurethaan componenten van de kompressen kunnen aantasten.

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66800247	5 x 5 cm	10
66800248	10 x 10 cm	10
66800249	10 x 20 cm	10
66800250	15 x 15 cm	10
66800251	20 x 20 cm	10

Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020 - 654 39 99
F 020 - 653 20 99
E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl
www.allevyn.com