



UrgoClean Ag



HET ENIGE VERBAND DAT EEN ANTIBACTERIËLE EN REINIGENDE WERKING COMBINEERT



CE 0086

VOOR DE LOCALE BEHANDELING VAN EXSUDERENDE WONDEN VANAF DE DEBRIDEMENTFASE MET EEN RISICO OP INFECTIE OF MET LOCALE INFECTIEVERSCHEIJNSELEN




| | Afmeting | Stuks | Z-index Code | Artikelnummer |
|---------------------|------------|-------|--------------|---------------|
| UrgoClean Ag | 6 x 6 cm | 5 | 16078020 | 551401 |
| | 10 x 12 cm | 5 | 16078039 | 551402 |
| | 15 x 20 cm | 5 | 16078047 | 551403 |

Urgo Nederland B.V.
Spinding 3A
5431 SN Cuijk
Tel.: +31 (0) 485 - 820010
www.UrgoMedical.nl



UrgoClean Ag

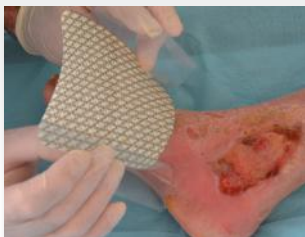

BESCHRIJVING

- UrgoClean Ag is een steriel non woven verband, dat is opgebouwd uit sterk absorberende en cohesieve hydro-reinigende vezels (polyacrylaat).
- Het hydro-reinigend verband is gecoat met een zachtklevende TLC Healing Matrix laag (Technology Lipido-Colloïd) geïmpregneerd met zilver. Deze combinatie van TLC-Ag zorgt voor een anti-bacteriële werking, geleert eenvoudig en vergemakkelijkt daardoor de drainage en het vasthouden van debris in het verband. Bovendien zorgt ervoor dat de TLC Healing Matrix het verband eenvoudig kan worden aangebracht en verwijderd.
- Om de polyacrylaatvezels te binden wordt gebruik gemaakt van thermobinding. Deze vezels zijn zo gerangschikt dat UrgoClean Ag specifieke eigenschappen vertoont in het absorberend vermogen, het vasthouden van het debris uit de wond in het verband en vormvastheid.

EIGENSCHAPPEN

- In contact met het wondexsudaat vormt de TLC-Ag laag een gel, waardoor een vochtig wondmilieu ontstaat dat gunstig is voor de wondgenezing.
- Bovendien zorgen de Ag+ ionen van UrgoClean Ag voor een antibacteriële werking die de lokale bacteriële groei remt. De Ag+ ionen bestrijden een breed spectrum aan gramnegatieve- en grampositieve bacteriën en sommige gisten. UrgoClean Ag is bijzonder effectief tegen Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes en Pseudomonas aeruginosa (bacillus pyocyanic), die het meest verantwoordelijk zijn voor geïnfecteerde wonden. UrgoClean Ag is effectief binnen 24 uur en werkt gedurende 7 dagen (in vitro getest op S.aureus en Paeruginosa).
- Tegelijkertijd geleren de hydro-actieve reinigende polyacrylaatvezels en hechten zich aan het debris, waarna dit wordt geabsorbeerd en opgesloten in het verband (autolytisch debridement). Door het verwijderen van exsudaat, debris en bacteriën houdt UrgoClean Ag de wond schoon van invloeden die de groei van bacteriën en de vorming van de biofilm kunnen bevorderen. Dit zorgt voor een betere werking van Ag-ionen in het wondbed.
- Dankzij de sterke hydro-reinigende vezels is UrgoClean Ag in één stuk in zijn geheel te verwijderen.
- De ontstane gel kleeft niet aan de wond, waardoor het verband makkelijk te verwijderen is met weinig tot geen beschadiging van het wondbed met als gevolg een pijnloze verbandwissel.

INDICATIES

- UrgoClean Ag is geïndiceerd voor de lokale behandeling van chronische exsuderende wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet), traumatische exsuderende wonden (brandwonden, chirurgische wonden) met een risico op een infectie of met tekenen van een lokale infectie in de debridementsfase.

GEBRUIKSAANWIJZING

WONDVOORBEREIDING

- Reinig de wond volgens het lokale protocol en spoel eventueel na met een fysiologische zoutoplossing.
- Het gebruik van UrgoClean Ag voorkomt niet dat ook mechanisch debridement mogelijk noodzakelijk is.

- Gedurende de reinigingsfase kan het lijken dat de wond groter wordt ten gevolge van het debridement, wat in de wond plaatsvindt.

AANBRENGEN VAN HET VERBAND

- Verwijder de beschermende folie.
- Breng de zachtklevende laag van UrgoClean Ag aan op de wond. Aanbevolen wordt om de wondranden ruim te overlappen. UrgoClean Ag kan zodig met een steriele schaar op maat worden geknipt.
- Dek UrgoClean Ag af met een secundair verband dat geschikt is voor de plaats van de wond en de hoeveelheid gevormd exsudaat.
- Fixeer het verband met een zwachtel.
- Breng een compressieve zwachtel aan indien voorgeschreven.

VERBANDWISSELING

- **UrgoClean Ag verband moet afhankelijk van het gevormd exsudaat en de klinische toestand van de wond verwisseld worden. In het begin zal dit om de 1 à 2 dagen moeten gebeuren. Daarna kan het verband langer op wond blijven (maximaal 7 dagen laten zitten).**
- De maximale behandelingsduur van Urgoclean Ag bedraagt 1 maand.

VOORZORGSMAATREGELEN

- De behandeling met UrgoClean Ag moet onder medische supervisie gebeuren.
- Het gebruik van UrgoClean Ag voorkomt niet dat er een geschikt systemisch anti-bacteriële behandeling noodzakelijk is volgens het geldend beleid.
- De zacht klevende zilver TLC laag van UrgoClean Ag plakt aan latex handschoenen. Dit kan voorkomen worden door de vingertoppen licht te bevochtigen of gebruik te maken van een steriel pincet.
- Gelijktijdig gebruik van andere lokale middelen wordt niet aanbevolen.
- Voorkom het contact met electrodes of geleidende gels gedurende metingen van bijvoorbeeld EEG en ECG.
- Vanwege de beperkte beschikbaarheid van data omtrent zilver wordt voorzichtigheid geboden bij het herhaald of langdurig gebruik van zilver dressings bij kinderen en neonaten.
- Bij het ontbreken van specifieke klinische gegevens wordt het gebruik niet aangeraden bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die borstvoeding geven.
- Steriel per stuk verpakt voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan leiden tot infectierisico's.
- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.
- Het verband niet opnieuw steriliseren.
- Gooi eventueel ongebruikte delen van het verband weg.

CONTRA-INDICATIES

- Bekende overgevoeligheid van zilver.
- UrgoClean Ag niet gebruiken als een chirurgische wondverband voor sterk bloedende wonden.
- Gebruik UrgoClean Ag niet in combinatie met waterstofperoxide en antiseptica op basis van organisch kwik of hexamidine.
- Verband verwijderen bij patiënten die een MRI moeten ondergaan.

LEES DEZE BESCHRIJVING VOOR HET GEBRUIK
GOED DOOR